



Производитель компания REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH, D-49610 Quakenbrück, Германия

Tel: +49(0)5431-9416-66

[www.rebotec.de](http://www.rebotec.de)

Эксклюзивный представитель ООО «Медтехника РЕБОТЕК»

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

Tel: +7 (495) 504-26-51, 504-26-52

[www.rebotec.net](http://www.rebotec.net), [info@rebotec.net](mailto:info@rebotec.net)



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ\*

### Костыли подмышечные

#### Применение

Костыли подмышечные предназначены для людей с ограниченными функциями опорно-двигательного аппарата (как нижних, так и верхних конечностей) и служат для безопасности передвижения. Их можно использовать как в помещении, так и вне его. Непременно обратите внимание на меры предосторожности.

Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

#### Указания по монтажу и эксплуатации

##### **Установка высоты костыля**

Для установки нужной высоты рукоятки и опоры для руки извлеките красные зажимы (A – B) с помощью соответствующего инструмента. Вставьте инструмент в пространство между ручкой и зажимом (D) и поверните его.

**Внимание! Из-за напряжения материала зажим может отскочить!**

##### **Установка подмышечника костыля**

Сначала установите необходимую высоту валика (F-F).

Обратите внимание на отверстия (6,2 мм) в алюминиевых трубках.

##### **Установка опоры для руки**

Установите нужную высоту опоры для руки (C-C).


Обратите внимание на отверстия (6,2 мм) в алюминиевых трубках (A – B).

Обратите внимание также на то, что боковые линейки рукоятки покрывают сверху и снизу отверстие (I).

При установке высоты подмышечника красная пробка (G) должна находиться глубоко в отверстии, как и зажимы (A – B). Теперь окончательно зафиксируйте красные зажимы (H) в их позиции.

### Окончательная проверка

Проверьте прочное положение валика в позиции (F – F) и прочное положение опоры для руки в позиции (C – C). Костыли готовы к использованию.

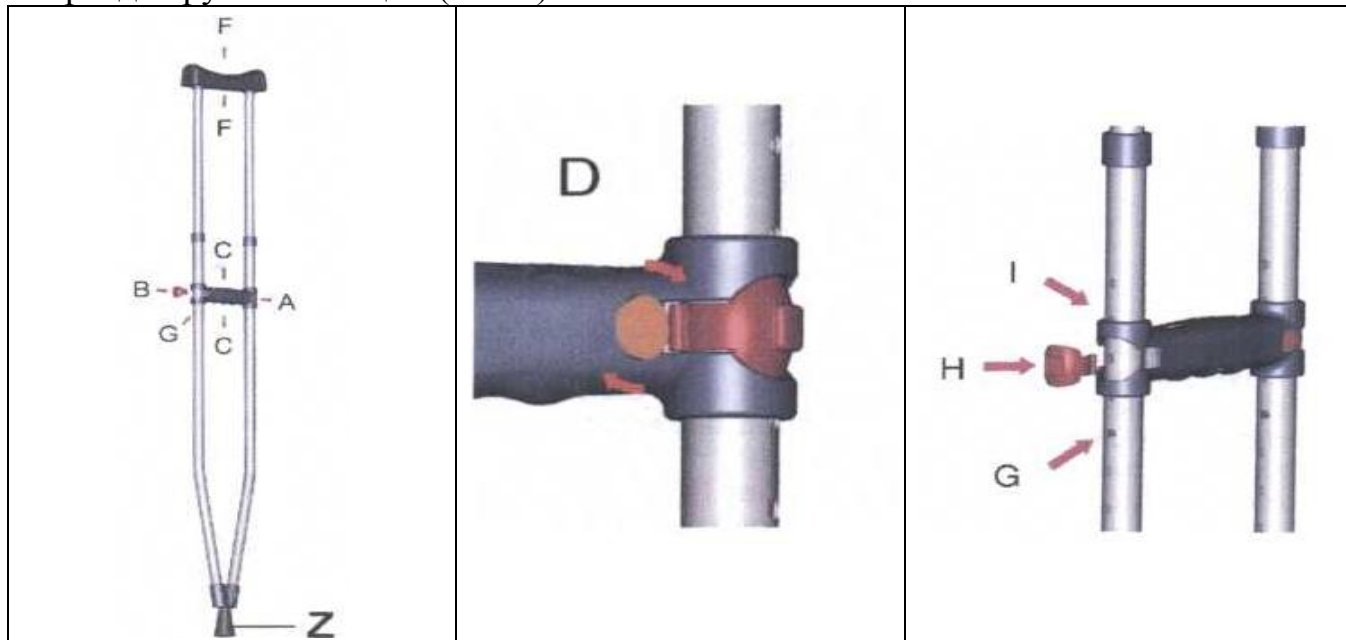

### Установка высоты костыля (модель 128.10 и 129.00)

С помощью гаечного ключа откручиваем колпачковые гайки (K) и вынимаем болты. Передвигаем нижнюю трубку на нужную высоту – обращая внимание на отверстия для фиксации – вставляем болты и снова закручиваем гайки (K).


### Установка высоты рукоятки

С помощью гаечного ключа откручиваем колпачковые гайки (J) и вынимаем болты. Соответствующую рукоятку – правую или левую – устанавливаем в нужное положение (обратить внимание на отверстия для фиксации). Вставляем болты и снова закручиваем гайки (J).



### Замена резинового наконечника у костылей

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Z). Снимите наконечник с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию, убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.

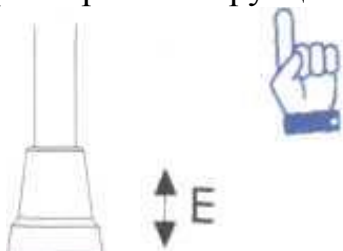

Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.

## Техническое обслуживание

### Уход

Трубку костыля достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

**Внимание! Не используйте чистящие средства, содержащие растворители или масляные компоненты!**

### Обслуживание

При каждом использовании проверяйте костыли на предмет повреждений. Проверьте прочность и правильность положения зажимов, наконечника, болтовые соединения, а также положение валика и трубок. В случае неисправности или деформации срочно обратитесь для проверки. Небрежный или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

### Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

## Инструкции по технике безопасности

- **Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!**
- Перед каждым использованием проверяйте костыли на наличие повреждений.
- При преодолении препятствий с Вами должен быть сопровождающий, чтобы он смог помочь Вам удержаться на ногах в случае падения.
- Если же падение неизбежно, постарайтесь отбросить костыли в сторону, чтобы Вы не упали на них.
- При прохождении лестницы одной рукой держитесь за перила, другой опирайтесь на костыль.



**Внимание! Возможная опасность: падение из-за соскальзывания**

- Регулярно проверяйте наконечник на наличие повреждений или износ.
- При ходьбе костыли должны быть в максимально вертикальном положении. Поэтому никогда не удаляйте их далеко от туловища.
- Используйте костыли только в качестве поддержки при ходьбе.
- Ни в коем случае ее нельзя использовать в других целях: опора для того, чтобы подняться, в качестве рычага или рукоятки, перестановки мебели и т.д.
- Механические изменения производить запрещено.
- Не вешать на костыли посторонние предметы (сумка, кошелек и т.д.).
- Не допускать попадания на костыли солнечных лучей в течение длительного времени (у окна, отопления, за окном автомобиля).
- Не используйте костыли без защиты от скольжения на обледенелой или заснеженной поверхности.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.

## Технические характеристики

Наименование костьюлей подмышечных	Модель	Нагрузка, кг	Высота подмышки, см	Высота рукоятки, см	Насадка	Цвет*
Квик эн Изи Софт	126.10.10	<b>130</b>	83,0-103,0	48,0-70,5	есть	50/30
Квик эн Изи Софт	126.20.10	<b>130</b>	100,5-120,5	58,0-80,5	есть	50/30
Квик эн Изи Софт	126.30.10	<b>130</b>	118,0-138	68,0-90,5	есть	10
Квик эн Изи Софт	126.40.10	<b>130</b>	135,5-155,5	75,5-98,0	есть	10
Квик эн Изи	127.10.10	<b>130</b>	83,0-103,0	48,0-70,5	есть	30/50
Квик эн Изи	127.20.10	<b>130</b>	100,5-120,5	58,0-80,5	есть	30/50
Квик эн Изи	127.30.10	<b>130</b>	118,0-138	68,0-90,5	есть	10
Квик эн Изи	127.40.10	<b>130</b>	135,5-155,5	75,5-98,0	есть	10
Квик эн Изи анатом	129.10.10	<b>130</b>	118,0-138	68,0-90,5	есть	10/50/30
Квик эн Изи анатом	129.20.10	<b>130</b>	118,0-138	68,0-90,5	есть	10/50/30
Биг 200	128.10	<b>200</b>	121,0-153,0	92,0-114,0	биг фут	00
Биг 160	129.00	<b>160</b>	121,0-153,0	92,0-114,0	биг фут	00

**\*00-серебристый, 10-черный, 30/50-красно-синий, 50/30-сине-красный**

По заказу, дополнительно костьюли подмышечные могут оснащаться следующими принадлежностями:

Запасные части и принадлежности	
Модель	Назначение
168.10.17	Наконечник Ø18,5-20 мм
200...00	Наконечник стандартный Ø19 мм
160.10	Мягкая прокладка для рукоятки
161.20	Мягкая прокладка для подмышечника
165.00	Отражатель Ø18-22 мм
470.22	Карго бокс на трость Ø22 мм (емкость транспортная)

### **\*Гарантийный талон на сервисное обслуживание**

#### **Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации - **24** месяца со дня продажи. Исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции должен быть произведен в компании **ООО «Медтехника РЕБОТЕК»** с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения - **36** месяцев.

Регистрационное удостоверение № **ФСЗ 2009/04930**, сертификат соответствия № **РОСС DE.ИМ25.А02931**

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.